

Gebruikershandleiding

EXSIT¹⁰¹

transport & evacuatiestoel



Inhoud.....Pagina

Inleiding	3
Verklaring functies van de stoel	5
Handleiding	7
Schoonmaken & verwijdering	11
Onderhoud & Garantie	11

Inleiding

Gefeliciteerd

Wij feliciteren u met de aankoop van de EXSIT¹⁰¹, een transport & evacuatiestoel. De EXSIT¹⁰¹ is ontwikkeld voor de evacuatie van niet-zelfredzame personen die niet zelf de trap kunnen gebruiken in geval van een calamiteit waarbij de lift niet meer kan of mag worden gebruikt.



Waarschuwingen

De EXSIT¹⁰¹ mag alleen worden bediend door getrainde hulpverleners.
Lees altijd de handleiding vóór gebruik!

Als u deze handleiding niet kunt lezen

Mocht u deze handleiding niet kunnen lezen, dan zijn er twee (2) alternatieven:

1. Bezoek onze website waar u een handleiding in een groter lettertype kunt downloaden.
2. Scan de QR-code op de stoel met uw smart phone; de QR-code brengt u dan direct naar een eenvoudige instructievideo op onze website.

Onze website: www.justbsure.com

Wanneer te gebruiken (indicaties)

Indicaties

- ❖ De EXSIT¹⁰¹ kan worden gebruikt wanneer ten tijde van een calamiteit de lift om welke reden dan ook buiten gebruik is.
- ❖ De EXSIT¹⁰¹ is ontwikkeld voor het transport trapafwaarts van niet-zelfredzame personen die niet zonder hulp een trap kunnen gebruiken.
- ❖ De EXSIT¹⁰¹ mag alleen door getraind personeel worden bediend.
- ❖ De EXSIT¹⁰¹ mag worden gebruikt op trappen met een helling tot 45°.
- ❖ Het gewicht van de te evacueren persoon mag niet hoger zijn dan 200 kg.
- ❖ Voor de evacuatie van personen zwaarder dan 150 kg dienen tenminste twee hulpverleners beschikbaar te zijn.



Wanneer niet te gebruiken (contra-indicaties)

Contra indicaties

- ❖ De EXSIT¹⁰¹ mag niet worden bediend door ongetraind personeel.
- ❖ Indien de te evacueren persoon zwaarder is dan 200 kg, dient een alternatieve wijze van evacueren gezocht te worden.
- ❖ Indien de te evacueren persoon zwaarder is dan 150 kg en er is slechts één (1) hulpverlener beschikbaar, dient een alternatieve wijze van evacueren gezocht te worden.
- ❖ Wanneer de trap steiler is dan 45° dienen er tenminste twee (2) hulpverleners beschikbaar te zijn.
- ❖ Wanneer de trap steiler is dan 45° mag de te evacueren persoon niet zwaarder zijn dan 150 kg.

Waar te gebruiken



De EXSIT¹⁰¹ transport en evacuatiestoel kan binnen en buiten meer-etage-gebouwen worden gebruikt. Dit hulpmiddel is geschikt voor elk type trap, ongeacht of deze van hout, steen, staal of glas is gemaakt.

Het functioneren van de stoel kan echter wel worden beïnvloed door natte omstandigheden. Gebruik de stoel **NOOIT** op een trap die bedekt is met ijs of sneeuw.

Dimensies

Opgevouwen: 1495 x 592 x 234 mm (hoogte x breedte x diepte)

Uitgevouwen: 1495 x 592 x 845 mm.

Eigen gewicht 15 kg



De producent

BSURE b.v.

Hoofdkantoor

Aerdsedijk 24

NL-6913 KD Aerdt

info@justbsure.com

www.justbsure.com

Serienummer

SN



Iedere EXSIT¹⁰¹ heeft een uniek serienummer, dat wordt vermeld op het typeplaatje aan de buitenkant van de ski.

Jaar en maand van de productie zijn opgenomen in het serienummer, zie pagina 6 van deze handleiding.

Pictogrammen

Pictogram	Betekenis	Pictogram	Bdetekenis
	Binnen en buiten te gebruiken		Producent
	Jaar en maand van fabricage		Serienummer
	Lees de handleiding		Maximum gewicht te transporteren persoon
	Dit product is conform de richtlijn 93/42 EEC voor medische hulpmiddelen		

Verklaring van de belangrijkste functies



LEGENDE

- 1 Handrem
- 2 Bovenframe met rubber greep
- 3 Rugleuning
- 4 Zitting
- 5 Onderframe met rubber grepen
- 6 Glijriemen
- 7 Borgpen
- 8 Voetremmen
- 9 Achterwielen
- 10 Voorwielen










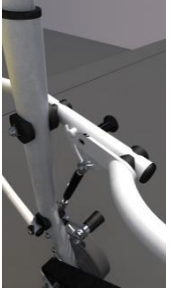
11 Muurklemmen voor het stallen van de EXSIT¹⁰¹ tegen de muur 7 Lock pin



12. Typeplaatje EXSIT¹⁰¹

12. Typeplaatje met serienummer






Gebruikershandleiding EXSIT¹⁰¹

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ De EXSIT¹⁰¹ mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. ➤ Bij voorkeur zijn er tenminste twee hulpverleners beschikbaar om de EXSIT¹⁰¹ te bedienen. ➤ In geval van extra zware evacuees, dienen er drie of zelfs vier hulpverleners beschikbaar te zijn.
1		<p>De EXSIT¹⁰¹ evacuatiestoel wordt met behulp van rubber klemmen tegen de muur gestald met de glijriemen naar u toe. Trek de stoel met een lichte beweging uit de klemmen naar u toe. De EXSIT¹⁰¹ kan zijn afgedekt met een opberghoes. Indien dat het geval is, dient deze hoes eerst verwijderd te worden. Nadat de hoes is verwijderd, of wanneer er geen hoes wordt gebruikt, kunt u de anti-slip handgreep met beide handen beetpakken en zo de stoel zacht naar u toetrekken.</p>
		<h2>Vóór gebruik controleren</h2> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Controleer of de wielen vrij lopen ➤ Controleer of de wielen vrij draaien ➤ Controleer of de zitting en rugleuning intact zijn ➤ Controleer de veiligheidsriemen ➤ Controleer of de glijriemen met de hand kunnen worden bewogen ➤ Controleer of de borgpen het uitvouwen van de EXSIT¹⁰¹ blokkeert ➤ Controleer de voetremmen ➤ Controleer de handrem
2		 <p>De EXSIT¹⁰¹ is opgevouwen en staat op de twee achterwielen. Haal nu met uw voet de beide voetremmen omhoog. Rol de stoel in opgevouwen toestand naar de persoon die geëvacueerd moet worden.</p>
3		  <p>Om de EXSIT¹⁰¹ in één beweging gebruiksklaar te maken, hoeft u alleen maar de zitting omlaag te duwen tot de borgpen in de zekering klikt. De stoel is nu geborgen en kan niet meer worden opgevouwen zonder de borgpen eerst uit te trekken en zo te ontgrendelen. Zodra u de stoel heeft uitgevouwen, zullen ook de glijriemen naar achter uitvouwen.</p>





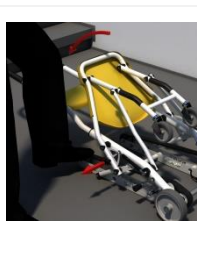
Gebruikershandleiding EXSIT¹⁰¹

4		<p>Wanneer u de persoon die moet worden geëvacueerd, heeft bereikt dient u eerst de voetremmen weer in te schakelen door ze met uw voet omlaag te duwen. Hiermee voorkomt u dat de EXSIT¹⁰¹ weggrolt wanneer de te evacueren person plaats neemt in de stoel.</p>
5		<p>Zodra de hulpverlener de te evacueren persoon heeft geholpen zitting te nemen in de stoel, dienen de veiligheidsgordels te worden aangesnoerd. Hierna kan de EXSIT¹⁰¹ van de voetremmen worden gehaald door deze met uw voet weer omhoog te duwen.</p>
		<p>Zodra de hulpverlener achter de evacuatiestoel plaatsneemt en de voetremmen op de beide achterwielen heeft ontgrendeld, mag hij/zij NOOIT de stoel loslaten, noch mag hij/zij de stoel vrij laten staan zonder de voetremmen in te drukken!</p>
6		<p>De persoon die de evacuatiestoel bedient rolt nu de stoel met de te evacueren persoon op vier wielen door de gang(en) tot aan de trap. Indien onderweg om welke reden dan ook moet worden gestopt, dient de hulpverlener de beide voetremmen met zijn/haar voet in te drukken. Zodra deze weer met de voet omhoog worden geduwd, kan de stoel weer vrij worden bewogen</p>
		<p>Vanaf het moment dat de hulpverlener de stoel met de te evacueren persoon op de trap bedient, mag deze de stoel NOOIT loslaten en dient hij/zij ALTIJD de handgreep van het bovenframe en de handrem vast te houden!</p>
7		<p>Aangekomen bij het trappenhuis wordt de EXSIT¹⁰¹ rustig naar de eerste traptreden vervoerd. Bij voorkeur door twee personen, dat wil zeggen één persoon achter de stoel met beide handen aan de rubber handgreep; de andere persoon opent deuren en controleert of de evacuatieroute vrij en veilig is en controleert tevens de conditie van de te evacueren persoon. Vervolgens assisteert deze tweede persoon bij het transport trapafwaarts door de stoel bij de rubber handgrepen op de voorzijde van het onderframe vast te pakken.</p>

Gebruikershandleiding EXSIT¹⁰¹

8		<p>Normaal gesproken bedient de persoon achter de stoel de EXSIT¹⁰¹. Aangekomen bij de trap, plaatst de hulpverlener één voet op de dwarsstang tussen de beide ski's en trekt vervolgens met een rustige beweging de stoel een klein stukje naar achter zodat de voorwielen los van de grond komen. Pas dan rolt hij/zij de stoel op de beide achterwielen naar de eerste traprede.</p>
		<p>Indien de te evacueren persoon erg zwaar is, moet worden overwogen twee, drie of zelfs vier hulpverleners in te schakelen. In die situatie bevinden zich een of twee personen achter én een of twee personen aan de voorzijde van de EXSIT¹⁰¹!</p>
9		<p>Vervolg op stap 8: wanneer de EXSIT¹⁰¹ lichtelijk naar achter is getrokken, dat wil zeggen met de voorwielen lichtjes van de grond, kan de stoel naar de eerste traprede worden vervoerd. Zodra de grote achterwielen de eerste traprede passeren, nemen de glijriemen het transport trapafwaarts direct over.</p>
		<p>Rijd de stoel NOOIT in rolstoelstand op vier (4) wielen naar of op de trap!</p>
10		<p>Zodra u de eerste trapreden bent gepasseerd heeft de stoel dus op twee punten contact met de trap. Trek de stoel nu lichtjes naar achter, zodanig dat de beide achterwielen de tweede traprede passeren. Land dus niet met de beide achterwielen op de tweede traprede maar zorg ervoor dat de stoel alleen met de glijriemen in contact staat met de trap. Nu heeft de stoel op vier punten contact met de trap en kan rustig naar beneden worden gebracht.</p>

Gebruikershandleiding EXSIT¹⁰¹

11			<p>Indien u het gevoel heeft dat de stoel te snel naar beneden gaat, laat u de handrem ietsje vieren. Met behulp van de handrem kunt u de afdaalsnelheid naar wens beheersen en bijsturen. Als u de handrem helemaal loslaat, zal de stoel geheel tot stilstand komen en niet meer verder glijden. Zodra u het transport wilt hervatten, knijpt u de handrem weer in en de stoel zal vanzelf naar beneden glijden.</p>
		<p>Laat de stoel, wanneer deze op de trap tot stilstand is gekomen NOOIT los!</p>	
12		<p>Bent u eenmaal onder aan de trap aangekomen, dan kunt u de beide achterwielen rustig laten landen, vervolgens de stoel op vier wielen zetten om uw weg in de rolstoelstand te vervolgen naar een volgende trap of de uitgang.</p>	
13		<p>Wanneer u klaar bent met de EXSIT¹⁰¹, kunt u deze weer in de klemmen tegen de wand plaatsen of in de BHV-kast opbergen. Duw eerst de beide voetremmen omlaag met uw voet en leg de stoel op de ski's op de grond. Plaats uw linkervoet op een ski en trek de borpen met uw linkerhand uit. U kunt nu met uw rechterhand de zitting inklappen. U trekt nu de stoel overeind en plaatst hem in de muurklemmen. Indien aanwezig dekt u de stoel af met de opberghoes.</p>	

Schoonmaken & verwijdering

BSURE heeft een opberghoes voor de EXSIT¹⁰¹ ontwikkeld. Zie onze website www.justbsure.com voor meer details. Wij adviseren het gebruik van deze hoes tenzij de EXSIT¹⁰¹ wordt gestald in een BHV-kast.

Schoonmaken kan het beste worden gedaan met een vochtige doek. Indien gewenst kan de EXSIT¹⁰¹ worden gereinigd met een normaal desinfecterend middel.

BSURE is verantwoordelijk voor de ontdoening van de EXSIT¹⁰¹ aan het einde van de levenscyclus van de stoel. Wanneer de klant besluit de EXSIT¹⁰¹ te vervangen, moet het hulpmiddel worden teruggesturd naar de producent die zorg zal dragen voor een duurzame verwijdering en ontdoening.

Onderhoud & Garantie

De EXSIT¹⁰¹ moet eenmaal per jaar worden onderhouden door BSURE of door een door BSURE geaccrediteerde of geautoriseerde partij. Tijdens het onderhoud zullen tenminste de volgende onderhoudsverrichtingen worden uitgevoerd:

- ❖ Algehele visuele inspectie
- ❖ Controleren remmen voor horizontaal en verticaal transport
- ❖ Controleren veiligheidsriemen
- ❖ Controleren glijriemen
- ❖ Gasveren voor de one-move-ready functie
- ❖ Borgpen
- ❖ Et cetera.

Op de EXSIT¹⁰¹ wordt een garantie van tien (10) jaar afgegeven, met uitzondering van de slijtdelen. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van kracht:

- ❖ De EXSIT¹⁰¹ mag alleen worden bediend door getraind personeel
- ❖ De EXSIT¹⁰¹ moet jaarlijks zijn onderhouden door BSURE of een van haar vertegenwoordigers.

Voor een lijst van onze vertegenwoordigers en voor verdere details betreffende de garantie, onderhoud en slijtdelen raadpleeg onze website www.justbsure.com